



Masque de protection réutilisable avec filtre à charbon actif

Méthode de désinfection - Four :

Faites chauffer le four à 70 degrés et collez le masque à l'intérieur pendant 1 à 2 minutes (avec les filtres appliqués).

À ne pas mettre au micro-ondes !

Méthode de désinfection – Machine à laver :

Retirez les filtres à charbon actif du masque (désinfectez les filtres dans le four à 70 degrés, à l'écart du masque).

Mettez le masque sans les filtres dans la machine à laver entre 40 et 60 degrés sans utiliser de détergent. (Poser en utilisant un savon doux ou neutre). Laisser sécher à l'extérieur, ne pas mettre dans le sèche-linge, ne pas repasser.

Ne pas laisser sécher directement au soleil afin de ne pas compromettre l'élasticité du masque.

Attention lorsque vous retirez le masque :

Prenez l'arrière du masque et retirez-le avec précaution en évitant tout contact avec le visage. Ensuite, disposez le masque dans le four ou la machine à laver. Lavez-vous les mains et désinfectez-les.

Comment distinguer les masques :

Dans la zone du velcro, il y a une ouverture circulaire qui identifie le masque de petite taille.

Ajuster la taille du masque :

Dans la partie inférieure du masque, il y a 2 petites coutures qui permettent de couper le tissu afin de pouvoir allonger le masque. Il suffit de couper l'excédent de tissu à la forme de votre visage, sans jamais dépasser les 2 coutures.

Adaptation nasale :

Réglable dans la zone nasale afin qu'il s'adapte au visage de chaque utilisateur.

Adaptation nasale : En cas de difficulté à respirer, peut laisser une petite ouverture pour une meilleure circulation de l'air

2 petites coutures pour que vous puissiez couper le masque à votre mesure

Réglage par velcro, facile à mettre et à enlever

